



MASCARILLA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla quirúrgica tipo I de polipropileno de un solo uso, marca Cuatrogasa Profesional.
- Tres capas
- Medidas (cm): 17,5x9,5 ± 5
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%): ≥95
- Presión diferencial (Pa/cm²): <40
- Limpieza microbiana (UFC/g): ≤30

INSTRUCCIONES DE USO, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS

Instrucciones:

1. Sujete la mascarilla con las dos manos, dejando la superficie hacia el exterior.
2. Colóquese la mascarilla debajo de la barbilla y pase las dos bandas por detrás de las orejas.
3. Ajusta la banda de la nariz para que se ajuste bien al puente de tu nariz, de acuerdo con el contorno de tu cara.
4. Manteniendo la banda de la nariz en su lugar, tire de la parte inferior de la máscara debajo de su barbilla para cubrir completamente su boca tu nariz, así como tu barbilla.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- No exponer a la luz solar directo ni a una la humedad relativa superior al 80%.

Advertencias:

- Evita que las gotas grandes expulsadas por el usuario lleguen al medio ambiente.
- Evita que las gotas, aerosoles o salpicaduras de partículas grandes que pueden contener virus y bacterias lleguen a la boca y la nariz del usuario.


NORMATIVA

Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios y con la norma EN 14683:2019+AC:2019 en base a mascarillas quirúrgicas.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	EAN 13	DUN 14
MPP	8436026590591	18436026590598

- **Formato de la unidad mínima venta (EAN):**
Dispensador 50 uds
 - Ancho: 18 cm
 - Alto: 10 cm
 - Largo/profundo: 7 cm
- **Caja (DUN):** 40
Dispensadores
 - Ancho: 38 cm
 - Alto: 30 cm
 - Largo/profundo: 52 cm
- **Capas/Palet:** 4
- **Cajas/Capa:** 4
- **Cajas/Palet:** 16
- **Altura palet:** 1,35 m

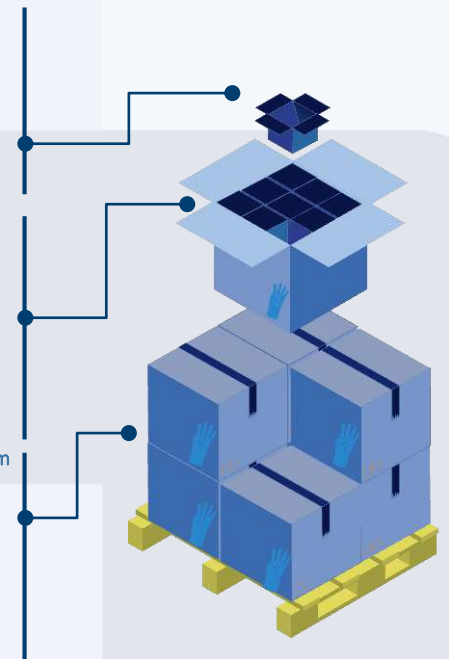

EN 14683 TIPO I

